



BBrain

Bringing generations **together**



Productpresentatie van de BBrain Family **G2** en **D2**

[www.bbrain.eu](http://www.bbrain.eu)

# BRENG GENERATIES NADER TOT ELKAAR MET BBRAIN

BBrain is marktleider op het gebied van kalenderklokken voor senioren. De klokken zijn in samenwerking met professionals ontwikkeld, speciaal voor een oudere doelgroep. Kenmerkend voor de BBrain is het gebruiksgemak en de mogelijkheid de klok mee te laten veranderen met de behoeftes van de gebruiker.

U kunt als familielid, mantelzorger of vriend(in) op afstand bijdragen aan meer structuur en zekerheid. De BBrain biedt tal van mogelijkheden, zoals het sturen van herinneringen, foto's en het toevoegen van agendapunten. Zo draagt de BBrain bij aan:



Dagelijkse planning  
& structuur



Contact  
& verbinding



Ondersteuning bij  
afgenomen tijdsbesef




Het vergroten van  
de zelfredzaamheid



Het verminderen  
van eenzaamheid



A person with long brown hair, wearing a white shirt with a blue floral pattern, is sitting at a desk. They are holding a white tablet computer in front of them. In the background, there is a white wall and a silver, spiral-shaped object hanging from the ceiling, possibly a lamp or a decorative piece. The person's right hand is raised, showing a ring on their ring finger.

De BBrain kalenderklokken beschikken over een aantal handige functies. Deze functies hebben allemaal als doel het leven van de gebruiker te vergemakkelijken. Breng generaties nader tot elkaar met de handige berichten- en fotofunctie en zorg voor meer grip op het dagelijkse leven met de agendafunctie.

### **Duidelijke tijdsaanduiding**

Zorg voor een beter tijdsbesef met de BBrain. De klok laat duidelijk de tijd, datum en het dagdeel zien. Met een blik op de klok weet de gebruiker hoe laat het is, welke dag het is en of het ochtend, middag of avond is. Dit zorgt voor meer zekerheid en zelfvertrouwen.

### **Agendafunctie**

Familie, vrienden en verzorgers kunnen eenvoudig via een app op hun telefoon of computer een afspraak of herinnering naar de klok sturen. Zo wordt nooit meer een afspraak vergeten!

### **Berichtenfunctie**

Dankzij de berichtenfunctie kunnen familie, vrienden en verzorgers een snelle reminder of een leuk bericht naar de klok sturen. Herinner de gebruiker bijvoorbeeld aan medicijnname of een afspraak. Wanneer de gebruiker het bericht ontvangt, wordt deze ook direct hardop uitgesproken.

### **Fotofunctie**

Deel alle mooie momenten via de BBrain. Dankzij de fotofunctie stuurt u eenvoudig foto's naar de klok. Zo betreft u eenvoudig uw naasten bij uw activiteiten. Met een druk op de foto, wordt de fotolijstfunctie geactiveerd.

### **Beeldbellen**

Sta direct in contact met uw naasten dankzij de beeldbelfunctie. Handig als u niet altijd de mogelijkheid heeft om langs te gaan maar toch graag uw dierbaren wilt zien en spreken. Ook voor uw naasten prettig en vertrouwd communiceren.

# WAT ALS MODERNE TECHNIEK VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK WORDT

We leven in snelle tijden waarin alles in hoog tempo verandert. Voor onze naasten is dit niet altijd even gemakkelijk. Daarom is er nu de BBrain: een klok die uitblinkt in gebruiksgemak, maar tegelijkertijd over alle nodige functies beschikt. Zo maakt de BBrain moderne techniek voor iedereen toegankelijk.



## Gesloten systeem

De klok heeft een gesloten systeem, waardoor het voor de gebruiker niet mogelijk is om uit de software te gaan en te gaan dwalen door de klok. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker voor verassingen of onbekende situaties komt te staan.



## Een duidelijke spraakfunctie

De klok beschikt over een uitspraakfunctie voor de tijd, agendapunten en berichten. Heeft de gebruiker een melding gemist? Met een klik op het agendapunt wordt de melding nogmaals uitgesproken. Door op de klokweergave te klikken, wordt de dag, datum en tijd uitgesproken.



## Een klok op maat

De BBrain is een klok die met de gebruiker meebeweegt. Soms worden bepaalde functies overbodig of heeft de gebruiker behoefte aan een rustiger thema van de klok. Met de BBrain is dit geen probleem. U kunt altijd de functies van de klok aanpassen aan de behoeftes van de gebruiker.



## Slechtzienden functie

Veel gebruikers en ouderen ondervinden problemen met het zicht. Om deze reden beschikt de klok over een speciale functie voor slechtzienden. Dit houdt in dat er thema's zijn die rekening hiermee houden en voor een hoog contrast zorgen.




## Altijd up-to-date

Updates worden automatisch naar de klok gestuurd. Zo worden nieuwe functies direct voor iedereen beschikbaar en is de klok altijd maximaal beveiligd.





# BBrain Family G2

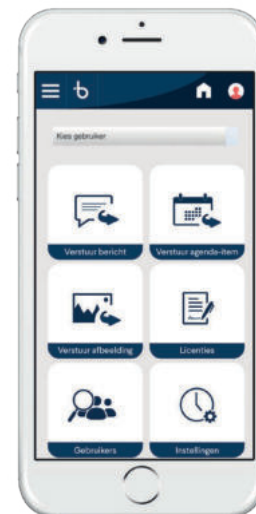

“

Dankzij de BBrain kan ik mooie momenten direct en moeiteloos met mijn vader delen

”

De BBrain Family G2 is een klok die speciaal gemaakt is voor senioren en hun naasten. Naarmate we ouder worden, vergeten we steeds vaker kleine dingen zoals afspraken met de dokter of (klein)kinderen. Met deze klok kunnen familieleden, vrienden en verzorgers eenvoudig berichten, foto's en agendapunten naar de klok sturen. Als senioren een herinnering nodig hebben voor het niet vergeten van een afspraak of het innemen van hun medicatie, kan er eenvoudig op afstand een bericht naar de klok worden gestuurd.



Spreekt de datum, tijd en het dagdeel uit




Ontvang foto's van familie en vrienden



Alle afspraken in een overzichtelijk scherm




Ontvang berichten en reminders

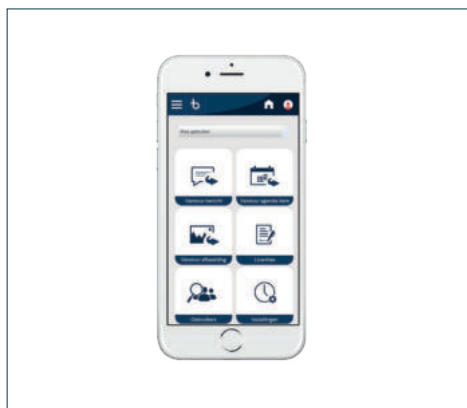


### Stap 1

De BBrain klok is gekoppeld aan de BBrain portal app. Met deze app kunt u eenvoudig kiezen welke functie u wilt gebruiken.

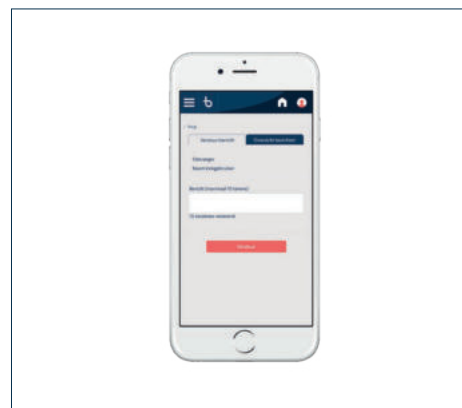


### Stap 2

In dit voorbeeld is de berichtenfunctie geselecteerd. Er hoeft alleen nog een bericht getypt te worden. Daarna kunt u het bericht versturen, waarna het op de klok verschijnt.

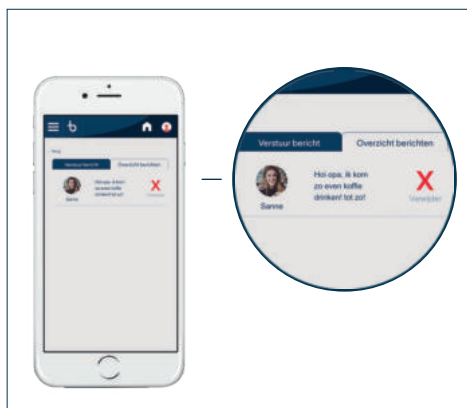

### Ter controle

Mocht u een afspraak willen verwijderen, dan kunt u dit ook via de app doen. U kunt via de app de klok en alle afspraken op afstand beheren.

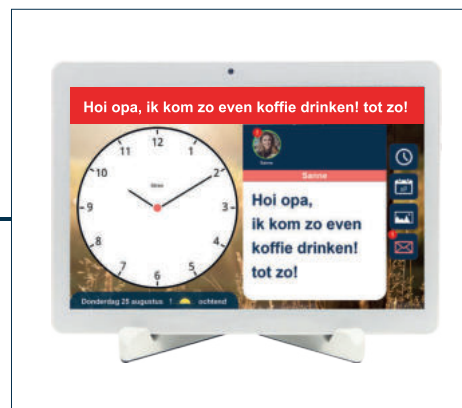

### Stap 3

De klokgebruiker krijgt een melding van het bericht op de klok. Deze wordt tevens direct uitgesproken. Zo kan de gebruiker het bericht niet missen.

# BBrain Family D2



“ Mijn moeder heeft dankzij de BBrain een beter besef van tijd, waardoor ze een stuk zelfverzekerder is geworden ”

De BBrain Family D2 is specifiek gericht op mensen die niet meer in staat zijn om interactie te hebben met de klok. Deze variant is zodanig ontwikkeld dat deze voor zo weinig mogelijk prikkels zorgt bij de gebruiker. De klok draagt bij aan een beter tijdsbesef, wat de gebruiker meer grip op zijn dag geeft. De ervaring heeft geleerd dat mensen met beginnende dementie baat hebben bij deze klok, omdat het hen meer houvast en zelfvertrouwen geeft.



Spreekt de datum, tijd en het dagdeel uit




De klok en tekst zijn extra groot




Geschikt voor mensen met dementie



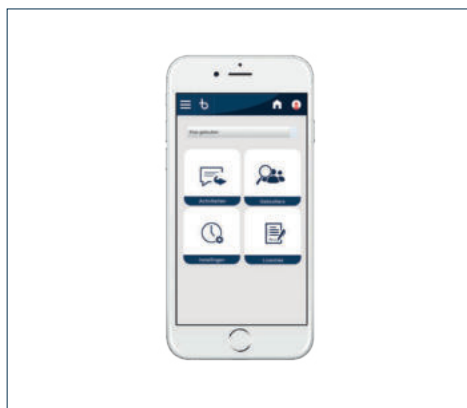


### Stap 1

Bij de BBrain Family D2 heeft u minder opties dan bij de G2. In dit scherm kunt u alleen een activiteit versturen en gebruikers/instellingen beheren. Op deze manier wordt de gebruiker beschermd van te veel prikkels.

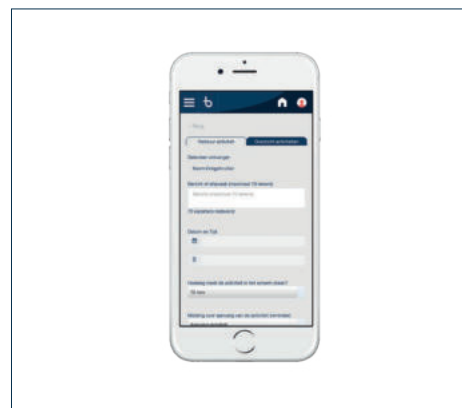

### Stap 2

U kunt een afspraak of bericht opstellen en op een specifiek moment versturen. De berichten kunnen herhaald worden, voor het geval de gebruiker het bericht mist op het moment van versturen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een foto mee te sturen.

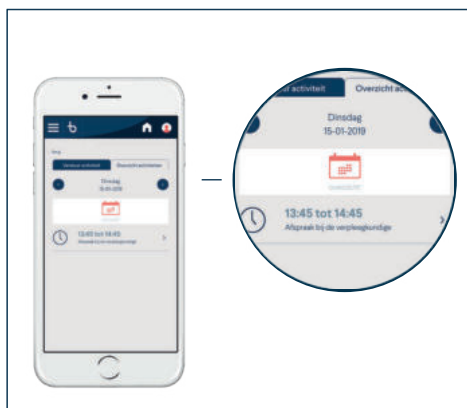

### Ter controle

U kunt indien gewenst een afspraak verwijderen. Ook heeft u inzicht in de afspraken of berichten die in de toekomst gepland staan.



### Stap 3

Op het gewenste moment krijgt de gebruiker het bericht of de reminder op het scherm te zien. De beheerder van de klok heeft de mogelijkheid om aan te geven of het bericht uitgesproken dient te worden. De rode balk zorgt voor contrast en voorkomt dat het bericht gemist wordt.

**ALTIJD EN  
OVERAL  
MOMENTEN  
DELEN**



**DAT IS PAS  
PERSOONLIJK**






# Bringing generations together



Uw leverancier

Scan de QR code en bekijk de video



 088 0080 130  
 [www.bbrain.eu](http://www.bbrain.eu)  
 [facebook.com/bbrain.clock](https://facebook.com/bbrain.clock)



41308