



gebruiksaanwijzing

Comfort

Indicatie

Matige tot ernstige flexie-/adductieproblemen van knieën en heupen.

Toepassing

Het aanbrengen van de FlexiOr® COMFORT ligorthese gebeurt op basis van de volgende drie stappen.

Stap 1:

Breng het kussen vanaf het voeteneind onder de hielen aan.

Stap 2:

Trek het kussen onder de benen naar boven richting de liezen, zodat de benen over de volle lengte worden ondersteund.



Stap 3:

Masseer het halfvemaan gedeelte van het kussen omhoog, zodat het de knieën beschermt.

** Situatieschets: cliënt ligt in rugligging, ligorthese verticaal, het halfvemaan gedeelte wijst richting cliënt, hoge deel bij de voeten, lage deel tegen de stuit.*

Attentie

- Links-rechtsverschillen zijn te compenseren via vulopeningen.
- De hielen steken bij voorkeur uit, maar mogen ook wegzinken in het kussen. Let op: de inhoud moet voldoende ruimte laten.
- Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te passen. Aangezien het kussen zich voegt naar de houding van de cliënt hoeft de orthese hierbij niet verwijderd te worden.
- Bij hygiënische verzorging van bijvoorbeeld liezen of stuit hoeft de orthese niet verwijderd te worden. Het simpelweg terug trekken van het kussen tot de onderbenen creëert ruimte voor behandeling zonder ondersteuning te verliezen.

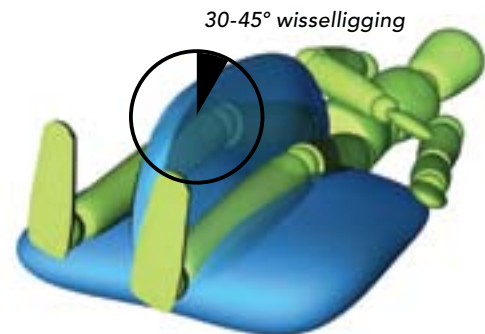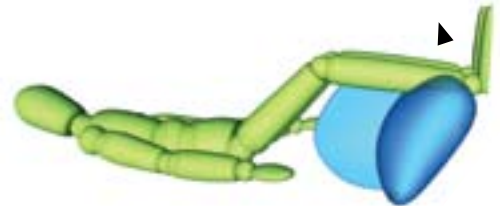

PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIIGGING