


DHG

Moving Health Forward

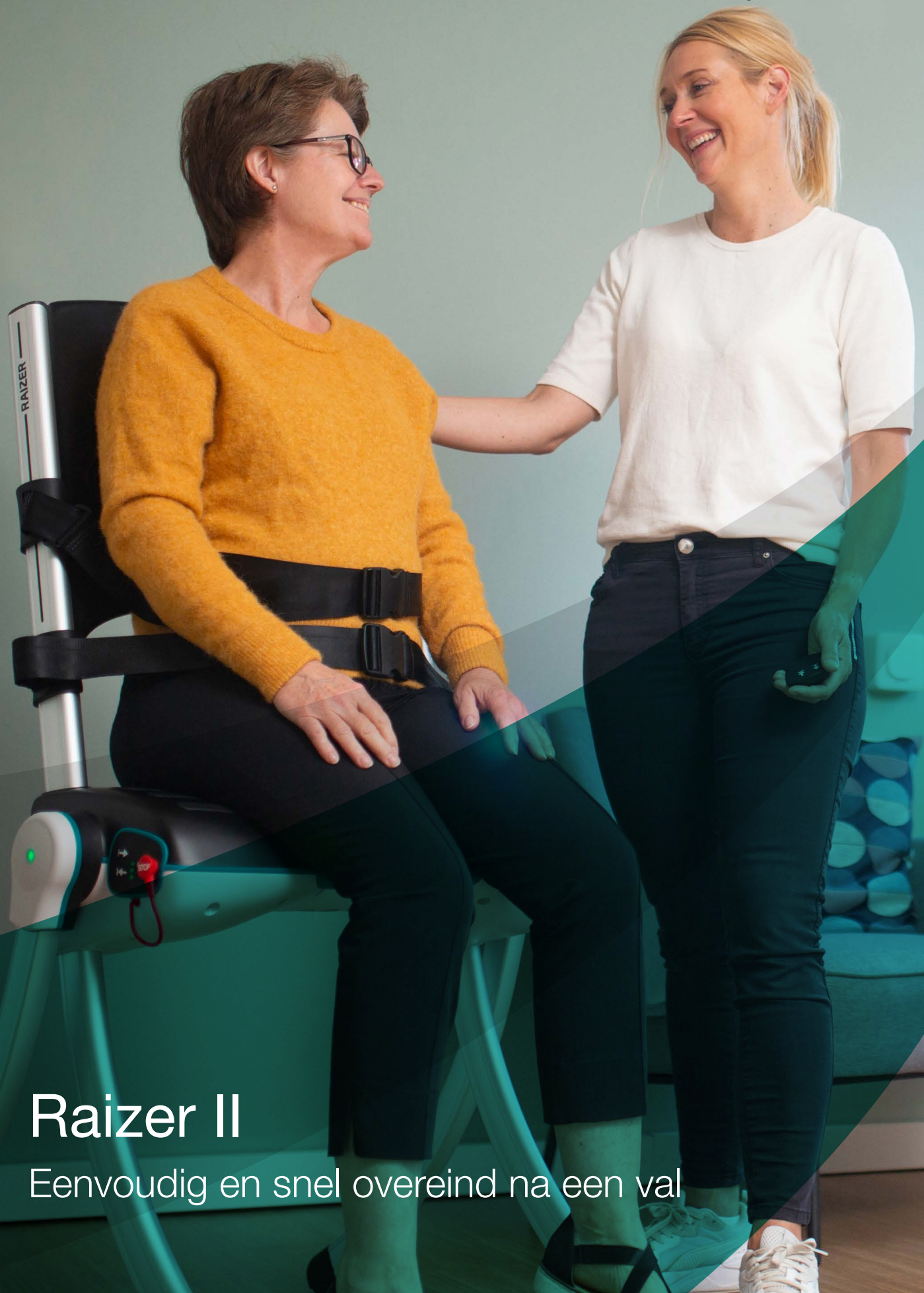

Raizer II

Eenvoudig en snel overeind na een val

De impact van een val

De impact van een val is niet te onderschatten. Direct Healthcare Group zet zich dan ook in om de gevallen zorgvrager op een veilige, waardige en snelle manier overeind te helpen, zonder fysieke belasting voor degene die haar of hem overeind helpt.

Valincidenten in cijfers



33%

van de 65-plussers valt jaarlijks



50%

van de 75-plussers valt jaarlijks



60%

van de 85-plussers valt jaarlijks



103.000

65-plussers behandeld op spoedeisende hulp na een val per jaar



5

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val

12% hiervan belandt op de spoedeisende hulp

Toename in valongevallen

Het aantal valongevallen neemt de laatste jaren toe en zal door de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen verder blijven toenemen. Naar schatting had 67% van de 65-plussers die na een valongeval op de SEH komen al een verhoogd valrisico.

Valincidenten komen dus vaak voor. Gelukkig leiden de meeste vallen niet tot ernstig letsel, maar ze kunnen ervoor zorgen dat de persoon het vertrouwen verliest, zich terugtrekt en het gevoel heeft dat hij zijn onafhankelijkheid heeft verloren. De tijd die nodig is om een gevallen persoon weer in een veilige en rechtopstaande of zittende positie te helpen, kan een aanzienlijke invloed hebben op zijn herstel.

Voorkom lang liggen

Uiteraard is valpreventie van belang om het aantal valincidenten te verminderen. Maar mocht een val plaatsvinden, dan is het belangrijk dat iemand veilig, waardig maar ook snel overeind wordt geholpen om verdere complicaties te voorkomen.

Uit een onderzoek van 2008 binnen de British Medical Journal* blijkt de significante morbiditeit en mortaliteit, geassocieerd met een "lange lig na val" (d.w.z. een patiënt die >1 uur op de grond ligt). Een lange lig na val heeft invloed op de ontwikkeling van decubitus, incontinentie, uitdroging, onderkoeling en daaruit voortvloeiende longontsteking. Maar ook psychologische gevolgen waaronder verlies van vertrouwen en dus mobiliteit, verhoogde kans op ziekenhuisopname, verhoogde kans om opnieuw te vallen en zelfs te overlijden. De Raizer II is het hulpmiddel om personen na een val veilig en snel overeind te helpen, zonder fysieke belasting van de zorggever.

* "Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort study in people over 90" by Jane Fleming and Carol Brayne in British Medical Journal, 17 Nov 2008.



De veilige en snelle hefstoel

Intuïtief in gebruik

Raizer II is een eenvoudige, op batterijen werkende mobiele hefstoel die een gevallen persoon in slechts 30 seconden overeind kan helpen. Raizer II kan eenvoudig worden gemonteerd en bediend door slechts één persoon en vereist geen fysieke inspanning behalve een ondersteunende hand. De Raizer II is zo ontworpen dat assemblage en bediening intuïtief zijn. Zo voorkom je foutief gebruik. Ook is de Raizer II eenvoudig mee te nemen en te reinigen.

Kenmerken

Raizer® II

Lifting Chair

4 IDENTIEKE POTEN en 2 IDENTIEKE RUGLEUNINGEN waarborgen een correcte montage

INTUÏTIEVE GELUID- en LED INDICATOREN voor een correcte montage

De DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING kan aan de zitting worden bevestigd voor opslag

Alle ZICHTBARE OPPERVLAKKEN zijn EENVOUDIG TE REINIGEN en DESINFECTEREN

EXTRA VEILIGHEIDSGORDELS kunnen worden bevestigd, voor meer stabiliteit van de gevallen persoon, als dit nodig is

DISPOSABLE HYGIËNEHOEZEN zijn ook verkrijgbaar (optioneel accessoire)


Technische specificaties

Model	Raizer II
Hefvermogen	Max. 150 kg
Hefduur	20 tot 30 seconden
Gewicht	Zitting: 8.5 kg Poten en rugondersteuning: 4.5 kg Totaal: 13 kg
Aantal tilcycli als batterij helemaal opgeladen is	40x bij maximale gewicht Ca. 80x bij gemiddeld gewicht
Oplaadtijd	Tot 6 uur
Oplaadtijd lege batterij	10 tot 15 min om 1x op te tillen
Opladers	USB oplader en 15W oplader voor standaard stopcontact

Voordelen van de Raizer II

- Verhoogd comfort en veiligheid voor gevallen persoon bij het opstaan
- Maakt tillen met 1 zorggever mogelijk
- Sneller overeind helpen zonder fysieke overbelasting voor de zorggever
- Compact, licht van gewicht en makkelijk mee te nemen
- Eenvoudig te monteren, intuïtief in gebruik
- Audio en visuele feedback voorkomen foutief gebruik
- 80 lifts per laadbeurt
- Verschillende accessoires mogelijk

In enkele eenvoudige stappen tot zit/stand met Raizer II

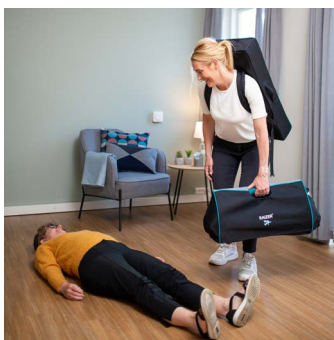

De 2 handzame en ergonomische gevormde tassen maken het vervoeren van de Raizer II eenvoudig. De poten, rugleuning en andere onderdelen zijn logisch gepositioneerd in de tas in volgorde van assemblage.



Eenvoudig en intuïtief te assembleren om gevallen persoon heen. Audio en visuele feedback ondersteunen juiste assemblage.



Met de uitneembare afstandsbediening kan de Raizer II bediend worden. Zo heeft de zorggever de volledige aandacht voor de gevallen persoon tijdens het tot zit komen.




De Raizer II zorgt voor het veilig, waardig en snel tot zit/stand helpen van gevallen personen. Dit is door slechts 1 zorggever uit te voeren, zonder fysieke overbelasting.

Accessoires



Disposabele hygiënehoezen

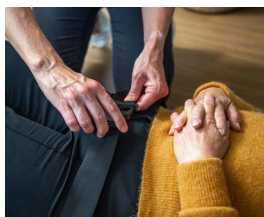

Veiligheids gordel



Draagtassen



Hoofdsteun



Fietsbeugel voor trolley



Drievoudig wiel voor trolley



Trolley



Muurbeugel kit

GEDISTRIBUEERD DOOR:



Medimpex Care Solutions
Faradaystraat 14-01
4004 JZ Tiel, Nederland
Tel: +31 (0) 344- 61 53 00
www.medimpex.nl
info@medimpex.nl



GEFABRICEERD DOOR:

DHG
Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Ltd Withey
Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, UK, CF83 1BF
Tel: +44 (0) 800 043 0881
Fax: +44 (0) 845 459 9832
info@directhealthcaregroup.com

GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER,
IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN DE EU:

DHG
Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40, Kista, Sweden
Tel: +46 (0) 8 557 200
www.dhg-healthcare.com
info@directhealthcaregroup.com