

# the slide solution

another Arion brand



**ARION**  
simply smile

## Inleiding

Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen, panty's en armkousen zijn vaak moeizame handelingen die dagelijks terugkeren. Om deze handelingen makkelijker en met minder krachtinspanning uit te voeren ontwikkelde Arion diverse aan- en uittrekhulpmiddelen. Dit assortiment is samengevat onder de naam The Slide Solution.

The Slide Solution biedt de totaal oplossing: alle soorten aan- en uittrekhulpmiddelen, zowel los als in +pakket. Zo is er voor elke compressiekousdrager een passend product. De afzonderlijke producten worden in deze brochure beschreven. Onmisbaar voor het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen met open en gesloten teen zijn de The Slide Solution Gloves. En voor het aantrekken van armkousen en van prothesen heeft Arion respectievelijk de Easy-Arm en de Easy-Proth ontwikkeld.

## Probleemstelling

Het aantrekken van therapeutische elastische kousen en panty's is voor zowel patiënten als zorgverleners een dagelijks terugkerende en moeizame handeling. In de CAO 'arbeid en gezondheid, verpleeg- en verzorgingshuizen' wordt het aan- en uittrekken van elastische kousen als derde hoofdbron van fysieke belasting genoemd. Hieromtrent is de volgende praktijkrichtlijn geformuleerd: 'Niet meer trekken dan 15 kilo in een gunstige, of 5 kilo in een ongunstige houding.' Effectief betekent dit dat bij het aantrekken van een therapeutische elastische kous van drukklasse 2 of hoger altijd een aantrekhulpmiddel gebruikt dient te worden. Dit is ook nog eens bevestigd door het Thuiszorg protocol "Steun de steunkous" dat in 2005 is uitgebracht voor zorgverleners om in de thuissituatie de therapeutische elastische kousen verantwoord aan en uit te trekken met behulp van een hulpmiddel. Ook voor patiënten die deze zorgtaak zelfstandig uitvoeren wordt de fysieke belasting een steeds groter probleem, zelfs zodanig dat dit direct een nadelig effect heeft op de therapietrouw.

## Oplossing

Onze aantrekhulpmiddelen zijn specifiek ontwikkeld om de problemen bij het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen en panty's met een gesloten of open teenstuk op te lossen. De Slide Solution producten zijn gemaakt van zeer glad materiaal dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschappen vormen een ultraglad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie. De wrijvingsreductie van het product zorgt ervoor dat de fysieke belasting voor zorgverleners en patiënten tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft tevens een positief effect op de therapietrouw bij patiënten. Daarnaast kan de patiënt door de eenvoudige en duidelijke gebruiksaanwijzingen nog lange tijd onafhankelijk therapeutische elastische kousen en panty's aantrekken.

## Doelgroep

1. Patiënten die therapeutische elastische kousen en panty's dragen maar moeite hebben met het aan- en uittrekken en graag zelfstandig willen blijven.
2. Zorgverleners die dagelijks de taak hebben om therapeutische elastische kousen bij patiënten aan te trekken.

## Productvoordelen

- Reductie fysieke belasting voor de zorgverlener en de patiënt
- Toename zelfstandigheid en therapietrouw van de cliënt
- Elastische kousen behouden langer hun therapeutische druk
- Eenvoudig in gebruik
- Spaart tijd en kosten
- Lange levensduur
- Makkelijk mee te nemen
- Ook in maatwerk verkrijgbaar

## Assortiment



### Easy-Slide®



Hét aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische kousen en panty's met een open teenstuk.



### Magnide®



Het eenvoudigste aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische kousen en panty's met een gesloten teenstuk.



### Easy-Proth®

Hét aantrekhulpmiddel voor een bovenbeenprothese met ventielgat/zuigkoker.



### The Slide Solution Gloves



Onmisbaar hulpmiddel voor het aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen in combinatie met The Slide Solution producten.



### Sim-Slide®



Dé oplossing voor zowel het aan- als uittrekken van therapeutische elastische kousen met open teenstuk in één product.



### Easy-Slide® Arm



Hét aantrekhulpmiddel voor therapeutische elastische armkousen.



### Easy-Off®



Uittrekhulpmiddel voor therapeutische elastische kousen en panty's met een open of gesloten teenstuk.

	Easy-Slide	Sim-Slide	Magnide
<b>AANTREKKEN</b>			
Open teen	●	●	○
Gesloten teen			●
Armrous			
<b>UITTREKKEN</b>			
Open teen		●	
Gesloten teen		○	
<b>PRODUCTVOORDELEN</b>			
Zeer glad materiaal met speciale coating	●	●	●
Dubbellaagse toepassing	●	●	○
Reductie fysieke belasting zorgverlener	●	●	●
Reductie fysieke belasting patient	●	●	●
Toename zelfstandigheid en therapietrouw patient	●	●	●
Eenvoudig in gebruik	●	●	●
Makkelijk mee te nemen	●	●	●
Door elastische band eenvoudig om de enkel te fixeren		●	
Bijzonder gebruiksvriendelijk door magneetsluiting			●
Aan- en uittrekgemak door optimale grip op kous			
Voorkomt beschadiging van de kous door nagels/sieraden			
<b>ONDERHOUD</b>			
Handwas op lage temperatuur van 30°C	●	●	●
Niet chemisch reinigbaar	●	●	●
Drogen met een handdoek (nooit strijken of in de wasdroger)	●	●	●
<b>GARANTIE</b>	<b>6 maanden</b>	<b>6 maanden</b>	<b>6 maanden</b>

**MAAT OVERZICHT**

Easy-Slide	Art. nummer	Maat	Schoenmaat
	E01500	Extra Small	≤ 34
	E01501	Small	34-37
	E01502	Medium	38-41
	E01503	Large	42-45
	E01504	Extra Large	≥ 46

Sim-Slide	Art. nummer	Maat	Schoenmaat
	EoSLo1	Small	34-37
	EoSLo2	Medium	38-41
	EoSLo3	Large	42-45
	EoSLo4	Extra Large	≥46

Easy-Slide arm	Art. nummer	Maat	Lengte
	E01505	Medium	55,5cm
	E01506	Large	62,5 cm

Easy+ Easy-Slide	Art. nummer	Maat	Schoenmaat
	E01610	Small	34-37
	E01611	Medium	38-41
	E01612	Large	42-45
	E01613	Extra Large	≥ 46

Easy-Off	Easy-Slide arm	Easy+ Easy-Slide	Easy+ Magnide	Gloves
		●		●
	●		●	●
●		●	○	●
●		○	●	●
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	n.v.t.
●	●	●	●	n.v.t.
●	●	●	●	n.v.t.
6 maanden	6 maanden	6 maanden	6 maanden	n.v.t.

Magnide

Art. nummer	Maat	Schoenmaat
E01513	Medium	≤ 40
E01514	Large	> 40

Easy-Off


Art. nummer	Maat	Schoenmaat
E01510	Small	34-37
E01511	Medium	38-41
E01512	Large	42->45

Easy+ Magnide

Art. nummer	Maat	Schoenmaat
E01619	Medium	≤ 40
E01620	Large	> 40

Gloves

Art. nummer	Maat	Handmaat
E02973	Small	6 - 6,5
E02975	Medium	7 - 7,5
E02977	Large	8 - 8,5
E02978	Extra Large	9 - 9,5

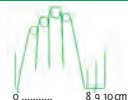






# Hoe gebruik ik Sim-Slide en Magnide



**sim-slide®**  
another Arion brand

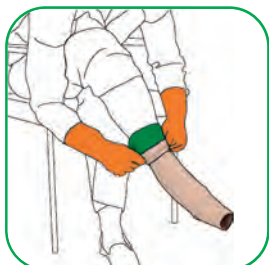

**magnide**  
another Arion brand

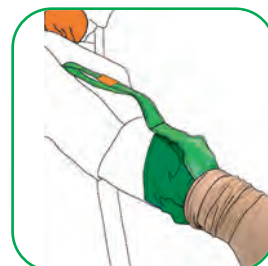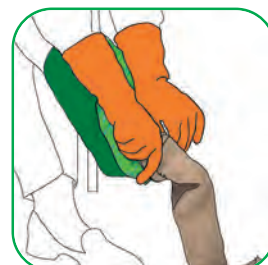

# Kwaliteit en Patenten

## De prijs van kwaliteit

Bij de ontwikkeling van onze producten staat productkwaliteit en gebruikservaring bovenaan. De Magnide is daarvan een goed voorbeeld. Dit lijkt op het eerste gezicht een heel eenvoudig product. De kracht van het product zit echter in de details. Doel was om 's werelds makkelijkste, eenvoudigste en beste aantrekhulpmiddel voor kousen met een gesloten teen te ontwikkelen. Dit alles met de hoogste kwaliteit en een sterk wereldwijd patent!



Arion ging daarvoor op zoek naar de beste materialen; magneten, stoffen, garens et cetera. De basis is het doek van al onze Slide Solution producten, een zeer glad doek dat bewerkt is met een speciale coating. Deze eigenschap vormt samen met de dubbel-laags toepassing een ultra glad eindproduct met een zeer hoge wrijvingsreductie.

De magneten moeten de perfecte magnetische sterkte hebben: niet te sterk en niet te zwak. De Magnide moet namelijk blijven zitten bij het aantrekken van de kous, maar wel makkelijk open gaan bij het verwijderen van de Magnide uit de kous. Daarbij was ook de dikte en grootte belangrijk. Na veel testen van magneten intern bij Arion en samen met TÜV is de perfecte magneet gevonden.

De magneten worden vastgezet op zeer glad materiaal. Door deze in 'pockets' te stoppen kunnen ze goed gepositioneerd worden. Om ze goed op hun plaats te houden en om te voorkomen dat de magneten gaan glijden zijn de pockets van ruw materiaal gemaakt.

Uiteindelijk zijn alle materialen uitvoerig getest en onderbouwd om de kwaliteit te maximaliseren.

## De waarde van patenten

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een exclusief recht, bedoelt om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen. Arion heeft in de afgelopen jaren 7 internationale patenten gekregen op haar Slide Solution producten. Vanwege deze bescherming zijn we in staat ook in de toekomst innovatieve producten te ontwikkelen. Zo blijft innovatie de belangrijkste drijfveer van Arion!



## Review Magnide



“Persoonlijk vind ik het magneet systeem van de Magnide een duidelijke vooruitgang in vergelijking met de Easy-Slide Caran. Redenen hiervoor zijn dat de sluiting makkelijker open gaat en dat de kleine kans op beschadiging van kousen die er was voorkomen wordt. Er is minder kracht nodig en het dichtvrouwen oogt minder ingewikkeld. Ik heb het product door diverse klanten gedurende enkele weken laten testen. De bovenstaande punten werden ook zo door de klanten ervaren. Vooral het verbeterde gebruiksgemak werd ook door hun als erg positief ervaren. Samenvattend zou ik de Magnide zeker aanraden, omdat deze aantrekhulp het aantrekken van uw therapeutisch elastische kousen weer een stukje gemakkelijker maakt!”

*Onno Smeets, consulent TEK, Spronken Orthopedie*



Arion is een innovatief bedrijf, actief op de internationale markt voor hulpmiddelen in de zorg. Het bedrijf speelt in op de toenemende vergrijzing en verschraling in de zorgsector en ontwikkelt, produceert en vermarkt vernieuwende, functionele producten. Deze producten, zoals aan- en uittrekhulp voor therapeutische elastische kousen en producten waarmee je zonder water een patiënt kunt wassen, verbeteren het gebruiksgemak en de efficiency in de gezondheidszorg.

Bezoek voor meer informatie onze website [www.arion-group.com](http://www.arion-group.com)

---

**Arion Nederland B.V.**

Vouersweg 103 • 6161 AG GELEEN

Tel.: 0800 - 621 31 41 • Fax: 0800 - 621 31 42

E-mail: [arionnl@arion-group.com](mailto:arionnl@arion-group.com)

[www.arion-group.com](http://www.arion-group.com)