



Gebruiksaanwijzing

MKK-DIS002 “Mitty Secure”

Antiplukwant dubbel gepolsterd met dubbele klittenband



Beoogde gebruiker:

Dit medisch hulpmiddel is bestemd voor gebruik door medisch professionals.

Beoogd doelind:

Een antiplukwant is een gepolsterde bescherming om de hand en vingers, ter voorkoming van automutilatie, uittrekken van medisch materiaal, zoals infusen of slangen en ter voorkoming van plukken.

Indicaties voor gebruik:

- Patiënten die risico lopen een levensreddende behandeling te onderbreken door het infuus los/uit te trekken.
- Patiënten die risico lopen om slangen los te trekken waarmee de gemonitord wordt.
- Patiënten die plukken, trekken en/of krabben, waardoor zij zichzelf verwonden of reeds bestaande wonden vergroten.

Contra-indicaties:

- Niet toepassen bij patiënten die erg agressief, geagiteerd of suïcidaal zijn.
- Niet toepassen bij patiënten:
 - o Als de infuuswond vergroot wordt door de antiplukwant.
 - o Met een breuk of verrekking van de hand.



REF

MKK-DIS002

Samenstelling:

33% katoen, 67% polyester

Uitleg van symbolen



Fabrikant



Fabricagedatum



Medisch hulpmiddel



Catalogusnummer



Batchnummer



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik



Eén patiënt - meervoudig gebruik



Houd droog



Houd weg van zonlicht



Niet steriel



Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is

Productomschrijving:

Verpakking

Het product is per paar verpakt in een transparant zakje.

Opslag en handling

- Dit product is ontworpen voor gebruik in een binnenomgeving.
- Dit product kan worden opgeslagen bij normale vochtigheidsniveaus in normale magazijntemperaturen. Voorkom overmatig vocht of hogere luchtvochtigheid waardoor producten kunnen beschadigen.



Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik:

Herhaal stap 1-5 voor elke want

1. Maak de sluiting van de handschoen open en schuif de hand er in.
2. Zorg dat de handpalm op het dikste gedeelte van de handschoen rust.
3. Het zachte gedeelte van de klittenband wordt door de katoenen lus en vervolgens door de plastic gesp gehaald. Wikkel vervolgens de klittenband om de pols heen (180 graden) en druk stevig aan op de ruwe zijde van het klittenband. Let op: laat een deel van het klittenband los voor de 'double-security' sluiting.
4. Bevestig het andere deel van de klittenband aan het vrije overgebleven stuk klittenband. Maak de 'double-security' sluiting af door het klittenband volledig om de pols te sluiten.
5. Controleer of de handschoen niet te los of te strak zit. Er moet nog een platte vinger tussen de sluiting en de pols van de patiënt passen.

Monitor volgens het beleid van de instelling of het ziekenhuis om er zeker van te zijn dat:

- De wanten veilig zijn aangebracht. Als deze te strak zitten, zal de bloedsomloop belemmert worden. Wanneer ze te los zitten, zal de patiënt in staat zijn de hand uit het want te laten glijden.
- De wanten intact zijn, niet gescheurd of beschadigd zijn, haken en lussen van de klittenband sluiten veilig. Sta patiënten NIET toe om onderdelen van de want door te slikken.
- De patiënt niet in staat is door gebruik van zijn of haar tanden of anderszins de want los te maken en zichzelf te verwonden.

Eén patiënt - meervoudig gebruik:

Hergebruik van dit product bij verschillende patiënten kan kruisbesmetting of productbeschadigingen veroorzaken. Human Protection B.V. en de distributeur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico's die zich voordoen door het hergebruik van producten die bedoeld zijn voor gebruik door één patiënt.

Wasvoorschriften:

- Maak alle gespen en sloten vast om het risico op beschadiging tijdens het wassen te verkleinen. Voor maximale levensduur wassen in een waszak.
- Klittenband sluitingen kunnen pluizen verzamelen na herhaaldelijk gebruik of wassen, waardoor het klittenband minder goed werkt. Maak klittenbanden vast om dit zo veel mogelijk te beperken. Gebruik zo nodig een harde borstel om pluusjes van de haakzijde te verwijderen.
- Was en droog het product om de levensduur te verlengen op een lage temperatuur. De maximale wastemperatuur is 60 graden Celcius, gebruik geen bleekmiddelen.



LET OP! Net zoals het gedrag van patiënten niet 100% voorspelbaar is, is geen enkel product 100% onfeilbaar. Patiëntveiligheid vereist regelmatig herbeoordeling en monitoring van het product en situatie. Een product wat eerder werkte, kan mogelijk zijn doel missen als de mentale of fysieke gezondheids toestand van de patiënt verandert. Gebruik NOOIT producten waarvan u aanvoelt dat ze onveilig zijn. Raadpleeg de juiste medische instantie als u vragen heeft over de patiëntveiligheid.